

Swift™ FX

SISTEMA DE ALMOHADILLAS NASALES

Guía de colocación



1

- Sostenga las almohadillas a la altura de la nariz y póngase el arnés tirando de él por encima de la cabeza.
- El arnés debe quedar apoyado a mitad de camino entre las orejas y los ojos.



2

- Ajuste la correa superior en primer lugar.
- Pase la correa por la hebilla, una muesca a la vez.
- No la deje demasiado tirante.



3

- Ajuste la correa posterior para obtener un ajuste más preciso, de ser necesario.
- No la deje demasiado tirante.
- La correa posterior se puede colocar por encima o por debajo del cabello.



4

- Las almohadillas Swift FX están diseñadas para proporcionar un ajuste natural.
- Un pequeño ajuste puede hacer que las almohadillas queden colocadas en la nariz en el ángulo más cómodo.



5

- Conecte el tubo corto de la Swift FX al tubo de aire del equipo.
- La Swift FX ya está colocada y lista para utilizar.



CONSEJO

- Con el equipo encendido, compruebe que las almohadillas nasales se inflen correctamente. Para hacerlo, separe las almohadillas nasales del rostro y de las mejillas, compruebe que se hayan inflado y vuelva a colocarlas en la nariz.

FUNDAS BLANDAS OPCIONALES

- Envuelva cada lado del arnés con una de las fundas blandas, doblando la tira adherente superior por encima de la inferior y pegándola sobre ella.
- Las fundas blandas deben quedar colocadas en las mejillas, con las tiras adherentes situadas del lado exterior.



Nota: Para obtener más información, consulte el manual del usuario del sistema de almohadillas nasales Swift FX.

Swift™ FX

SISTEMA DE ALMOHADILLAS NASALES

Menos máscara. Más, tú!

- Diseño minimalista refuerza la sensación de libertad
- Suavidad, sencillez y estabilidad sin precedentes
- Forma flexible y natural que se adapta al contorno facial y a los movimientos del usuario
- Promueve la pronta aceptación del tratamiento
- Ajuste intuitivo, prácticamente instantáneo
- Desempeño estable, incluso con presiones elevadas


Almohadillas nasales de pared doble se sellan al contacto para brindar un sellado cómodo y delicado, se adaptan a una amplia gama de usuarios y dispersan el aire suavemente hacia la nariz

Almohadilla blanda y angosta con cámara flexible integrada brinda comodidad al dormir de costado y permite mantener el sellado durante el movimiento

Codo que gira 360° con gran facilidad gira con un movimiento fácil y fluido que brinda flexibilidad para elegir la posición del tubo

Orificios de ventilación silenciosos dispersan y dirigen sigilosamente el flujo de aire, alejándolo del usuario y de su pareja

Tubo liviano y flexible se estira y se dobla de forma única para brindar más estabilidad, sin necesidad de usar un retenedor

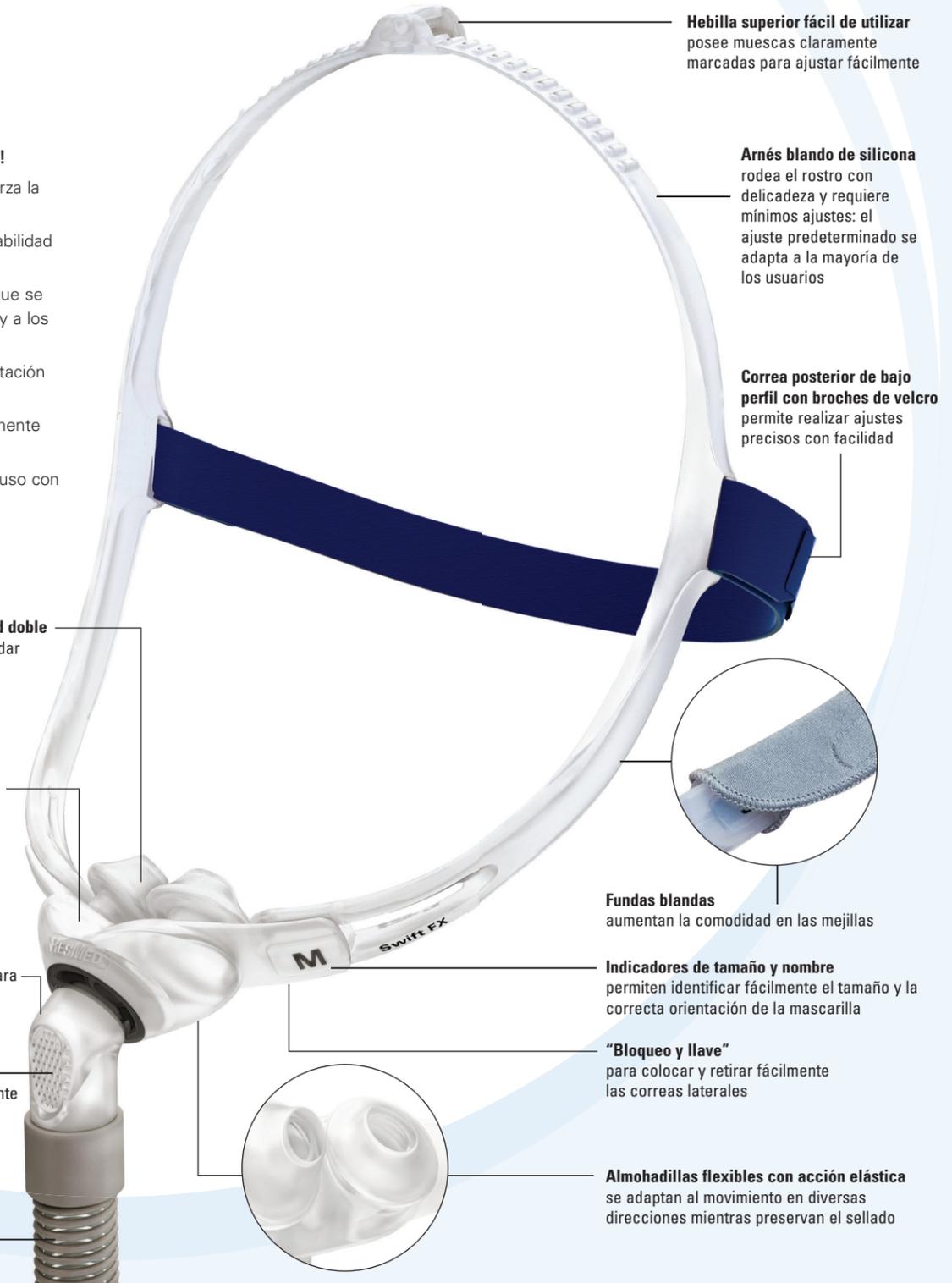

Hebilla superior fácil de utilizar posee muescas claramente marcadas para ajustar fácilmente

Arnés blando de silicona rodea el rostro con delicadeza y requiere mínimos ajustes: el ajuste predeterminado se adapta a la mayoría de los usuarios

Correa posterior de bajo perfil con broches de velcro permite realizar ajustes precisos con facilidad

Fundas blandas aumentan la comodidad en las mejillas

Indicadores de tamaño y nombre permiten identificar fácilmente el tamaño y la correcta orientación de la mascarilla

"Bloqueo y llave" para colocar y retirar fácilmente las correas laterales

Almohadillas flexibles con acción elástica se adaptan al movimiento en diversas direcciones mientras preservan el sellado



ASPECTOS DESTACADOS DE LA MASCARILLA

Comodidad total

- Gracias al contacto facial mínimo y al diseño discreto, la Swift FX hace que el tratamiento sea menos intimidante y más fácil de aceptar en las primeras etapas.
- Desde la punta de las almohadillas nasales, hasta los costados firmes y delicados, desde las fundas blandas que brindan confort, hasta la suave correa posterior...la Swift FX es tan liviana y suave que los pacientes se olvidan que la tienen puesta.
- Las ceñidas correas del arnés son las que mantienen el sellado, por lo que no es necesario dejar demasiado tirante el arnés y el usuario no siente que la mascarilla le aprieta.

BENEFICIOS PARA EL USUARIO

Suave comodidad, desempeño estable

- El delicado diseño de todo el sistema aumenta la comodidad.
- Las almohadillas nasales de pared doble y la base flexible de la almohadilla preservan el sellado y se adaptan al movimiento.
- El tubo liviano y flexible reduce la tensión en la mascarilla y aumenta la estabilidad.

Los pacientes pueden llegar a olvidar que la tienen puesta

- El diseño de pequeño tamaño refuerza la sensación de libertad: la sensación que la mascarilla brinda al usuario es tan importante como su apariencia en el rostro.

Permite dormir en diferentes posiciones

- Los usuarios de la Swift FX pueden dormir de costado o boca arriba, colocando el tubo en la posición que deseen.

Funcionamiento silencioso para lograr un sueño tranquilo

- El innovador diseño de la ventilación permite que el funcionamiento de la mascarilla sea ultrasilencioso: dispersa el aire con suavidad, alejándolo del paciente y de su pareja.

BENEFICIOS PARA EL PROFESIONAL

Ajuste intuitivo, casi instantáneo

- Permite a los médicos y profesionales del sueño ahorrar tiempo valioso. Una vez que se ha escogido el tamaño correcto de almohadilla, los ajustes necesarios son mínimos.

Sellado estable, incluso con presiones elevadas

- El sistema posee un diseño exclusivo que le permite mantenerse en su lugar y preservar eficazmente el sellado, incluso con presiones elevadas de tratamiento.*

Aceptación más fácil del tratamiento por parte de los pacientes

- La Swift FX está diseñada para gustar al instante y es una mascarilla que no intimida, con lo que facilita la pronta aceptación del tratamiento.

Menor inventario, se adapta a una amplia gama de usuarios (>95%)**

- Viene con almohadillas de tres tamaños que se adaptan a la mayoría de los usuarios y reducen el inventario.
- También se puede solicitar un tamaño extra pequeño.

Fácil manejo del producto

- Gracias a la pequeña cantidad de piezas que la componen, la Swift FX es fácil de lavar y de montar.

Práctica de recomendar o recetar

- El manual del usuario y la asistencia en línea facilitan la capacitación de los usuarios y del personal.



CÓDIGOS DE LOS PRODUCTOS

Sistema de almohadillas nasales Swift FX

Américas **61500**

Swift™ FX

SISTEMA DE ALMOHADILLAS NASALES

Tarjeta de componentes

Sistema completo

61500 (incluye almohadillas pequeñas (P), medianas (M) y grandes (G)*)

Sistema de armazón

(sin arnés)

XP* **61510**

P **61511**

M **61512**

G **61513**

Conjunto del arnés
(arnés, correa posterior)
61529

Conjunto del tubo corto
(tubo corto, codo y pieza giratoria)
60528 (1)
60527 (10)

Almohadillas
XP* **61520**
P **61521**
M **61522**
G **61523**

Fundas blandas
61530 (2)

* Las almohadillas extra pequeñas (XP) se deben solicitar por separado

* Probada hasta 20 cm H₂O en estudios clínicos

** Según las investigaciones de mercado de ResMed