



Un paso por delante

Philips Respironics OptiChamber Diamond

Cámara de inhalación antiestática con válvulas de inhalación y exhalación

Administración del aerosol con total fiabilidad

OptiChamber Diamond está fabricada con material antiestático y ha sido diseñada para ayudar a sus pacientes a lograr un tratamiento efectivo.

Combinación de comodidad y rendimiento

Las válvulas de baja resistencia se abren libremente incluso con tasas de flujo pediátricas bajas, lo cual permite al usuario respirar con facilidad a través de la cámara. La mascarilla facial desmontable cuenta con una almohadilla de contorno blando que se apoya suavemente sobre el rostro.

Características principales

- Válvulas de baja resistencia
- Cámara antiestática para facilitar un tratamiento inhalado más eficaz
- Adaptador flexible y universal de inhaladores en cartucho presurizado
- Mascarillas faciales desmontables, LiteTouch, con tecnología de sellado de mínimo contacto.

PHILIPS

RESPIRONICS

La respuesta a las diferentes necesidades de sus pacientes

OptiChamber Diamond ha sido diseñada para sus pacientes, incluidos aquellos que:

tienen mala coordinación en inhalación

El material antiestático mantiene el aerosol en suspensión durante más tiempo, lo que significa que su paciente dispone de más tiempo para inhalar la medicación^[1].

presentan una tasa de flujo inspiratorio baja

Las válvulas de baja resistencia permiten al paciente respirar con facilidad a través de la cámara, con una resistencia mínima.

deben utilizar una mascarilla

Basta con montar la mascarilla facial LiteTouch, que con su tecnología de sellado de mínimo contacto requiere una presión mínima para mantener el sellado adecuado^[2].

necesitan que otra persona les administre la medicación

La válvula de exhalación confirma visualmente la exhalación, lo cual ayuda al cuidador a realizar el recuento de las respiraciones del paciente y a coordinar su actuación.

Las mascarillas LiteTouch desmontables han sido diseñadas para adaptarse al contorno del rostro y reducir así las fugas

Aviso sonoro de flujo alto para realizar la técnica de inhalación correcta

Boquilla adaptable apta para niños y adultos

Se desmonta y limpia fácilmente con agua caliente y detergente líquido suave



| Especificación del producto | |
|-----------------------------|---|
| Dimensiones | |
| Volumen | 140 ml |
| Longitud | 14,2 cm |
| Boquilla | Interfaces con conectores estándar de 22 mm |
| Materiales | |
| Cámara | Plástico ABS antiestático |
| Mascarilla LiteTouch | Policarbonato (PC) y silicona |
| Válvulas | Silicona (sin látex) |
| Vida útil | Sustituir al cabo de un año |

| Información para pedidos | | |
|--|----------|-------------------|
| Descripción del producto | Cantidad | N.º de referencia |
| OptiChamber Diamond | 1 | 1079820 |
| OptiChamber Diamond (en bolsa) | 50 | 1083786 |
| OptiChamber Diamond con mascarilla pequeña | 1 | 1079822 |
| OptiChamber Diamond con mascarilla mediana | 1 | 1079825 |
| OptiChamber Diamond con mascarilla grande | 1 | 1079828 |
| Mascarilla pequeña LiteTouch | 1 | 1083785 |
| Mascarilla mediana LiteTouch | 1 | 1083784 |
| Mascarilla grande LiteTouch | 1 | 1083783 |

1. Mitchell J. et al. "Electrostatics and Inhaled Medications: Influence on delivery via pressurized metered-dose inhalers and add-on devices". Resp. Care. Marzo 2007, vol. 52 n.º 3.
 2. Hsu W. et al. (2011). "Evaluation of delivery efficiency from valved holding chambers with facemasks", Resp. Drug. Deliv. Europe 2011, 2, pp 505-510.

Respironics, OptiChamber y LiteTouch son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Visítenos en www.philips.es/respironics



© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Reservados todos los derechos.

Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

Broudy CSP 6/30/14 MCI 4106263 PN 1096630

Philips Healthcare forma parte de Royal Philips

Philips Respironics Iberia
+34 91 566 90 00

Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd
Chichester Business Park, City Fields Way
Tangmere, Chichester PO20 2FT
Reino Unido

Atención al cliente
+1 724 387 4000
www.philips.es/respironics